



ATNY Swab PCR Covid Test Instruction

Dr. Michael Tyberg M.D.
NPI:1730455783

目的:

綿棒の先に鼻水などの鼻腔拭い液を沁み込ませてDNAを採取します。

検体採取の手順:

1. 手洗いの後、袋の後ろ側から綿棒を取り出します。
2. 綿棒の真ん中の切れ目から前の部分、綿が付いている前部分を検査に使用しますので、**前部分は触らないようにお願いします。**
3. 綿棒の真ん中の切れ目の後ろの根本部分を持って下さい。
4. 綿棒の綿が隠れる程度(2cm)お鼻に挿入します。
5. 鼻の入り口で内側を10周なぞるようにゆっくりまわして下さい。
6. 鼻の下にあてて5~10秒ほど綿棒が湿るのを待ちます。
7. 反対の鼻でも同様に行います。
8. 綿棒が鼻水で湿っていれば完了です。



9. 綿棒の先から容器に入れて、テコの原理で棒を2つに折ります。
10. 2つ折りにした棒の根本の部分は捨てます。
11. キャップを閉めます。
12. フォームにお名前と生年月日を英語で記入します。

提出先: あつとニューヨーク 989 8th Ave, Room 504, New York, NY 10019 (on 8th Ave between 55 - 56th St)
日本語サポート 212-489-9070 / Emergency (緊急) 310-387-5020 / メール: cs@ny-pcr.com